

TUTORIAL RAPID TEST ANTIGEN SALIVA

1. Pakai sarung tangan
2. Buka kemasan Test Kit.
3. Beri nama di Test Kit.
4. Buka tutup tabung lalu pasang corong.
5. Ludahkan air liur ke corong secukupnya dan pastikan air liur tidak memiliki gelembung.
6. Lepaskan corong lalu buang corongnya ke plastik limbah.
7. Tutup tabung lalu homogenkan / campurkan dengan perlahan.
8. Buka tutup tabung dan ambil sampel dengan menggunakan pipet.
9. Teteskan \pm 3 tetes ke dalam lubang test Kit.
10. Baca hasil 5 – 15 menit.

Visual result read within 15 min.



- **Catatan :**
Jika hasil positif, bisa segera pulang dan melaporkan ke poliklinik.